

**biber**

# Eincreme- und Pflegeset Pláti



Anleitung

- Eincreme-Hilfe für Cremes, Körperlotionen und Körpermilch
- 7-Kammern-System für gleichmäßige Dosierung der Creme
- 17 bewegliche Kugeln zur Massage
- Schutzkappe verhindert Auslaufen der Creme
- Eine helfende Hand, die das Eincremen aller Körperbereiche erleichtert
- Der lange Stiel ermöglicht beispielsweise ein Eincremen der Unterschenkel ohne Bücken oder des Rückens
- Gleichmäßige Dosierung mit gleichzeitig sanfter Massage
- Der aufsteckbare Stiel ist teilbar und dadurch gut im Reisegepäck zu verstauen
- Leicht zu reinigen, Kugeln sind herausnehmbar – alle Teile sind spülmaschinengeeignet. ACHTUNG! Gilt nicht für den Bimsstein Aufsatz

### **Lieferumfang**

- Handgriff, teilbar mit Steckverschluss
- Creme-Aufsatz mit 17 Massagekugeln
- Aufsatz-Schutzkappe, transparent
- Bimsstein-Aufsatz

### **Anwendung**

1. Schrauben Sie das Unterteil des Creme-Aufsatzes ab und füllen Sie anschließend Creme, Lotion oder Duschgel in das 7-Kammernsystem ein. Schrauben Sie das Unterteil des Aufsatzes wieder auf das Kammersystem auf.
2. Stecken Sie beide Griffteile mittig ineinander.
3. Jetzt können Sie den Creme-Aufsatz oder Bimsstein-Aufsatz auf den Griff stecken.
4. Führen Sie das Eincreme- und Pflegeset mit leichten kreisenden, massierenden Bewegungen über die Haut.
5. Stets nach Gebrauch reinigen.
6. Drehen Sie danach die Schutzkappe auf den Creme-Aufsatz.
7. Entriegeln Sie die Griffteile, indem der Arretierungspunkt in der Mitte des Haltegriffs eingedrückt und gehalten wird. Anschließend die beiden Griffteile auseinanderziehen.

### **Reinigung**

Zum gründlichen Reinigen des Aufsatzes drehen Sie den Aufsatz auf und drücken die Kugeln nach außen heraus. Nach der Reinigung können diese wieder eingesetzt werden. Spülmaschinen geeignet. Nicht direkt über den Heizstäben einsortieren.

### **Material**

- Creme-Aufsatz/Handgriff: ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
- Kugeln: PP (Polypropylen)
- Deckel: SAN (Styrene Acrylonitrile copolymer)

### **Entsorgung**

Das Eincreme- und Pflegeset kann über den Kunststoffmüll entsorgt werden.

Bei sauberer Trennung kann ABS problemlos wieder eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Auch PP kann heute schon sortenrein aus dem Plastikmüll sortiert und wiederverwendet werden.

Version: 2021\_111103\_GA